


Аллергия, Антисептический, Мемору Пальцы, Signal Tone Звуковой сигнал, 100% waterproof 100%-ная водонепроницаемость, Flexible tip Гибкий наконечник

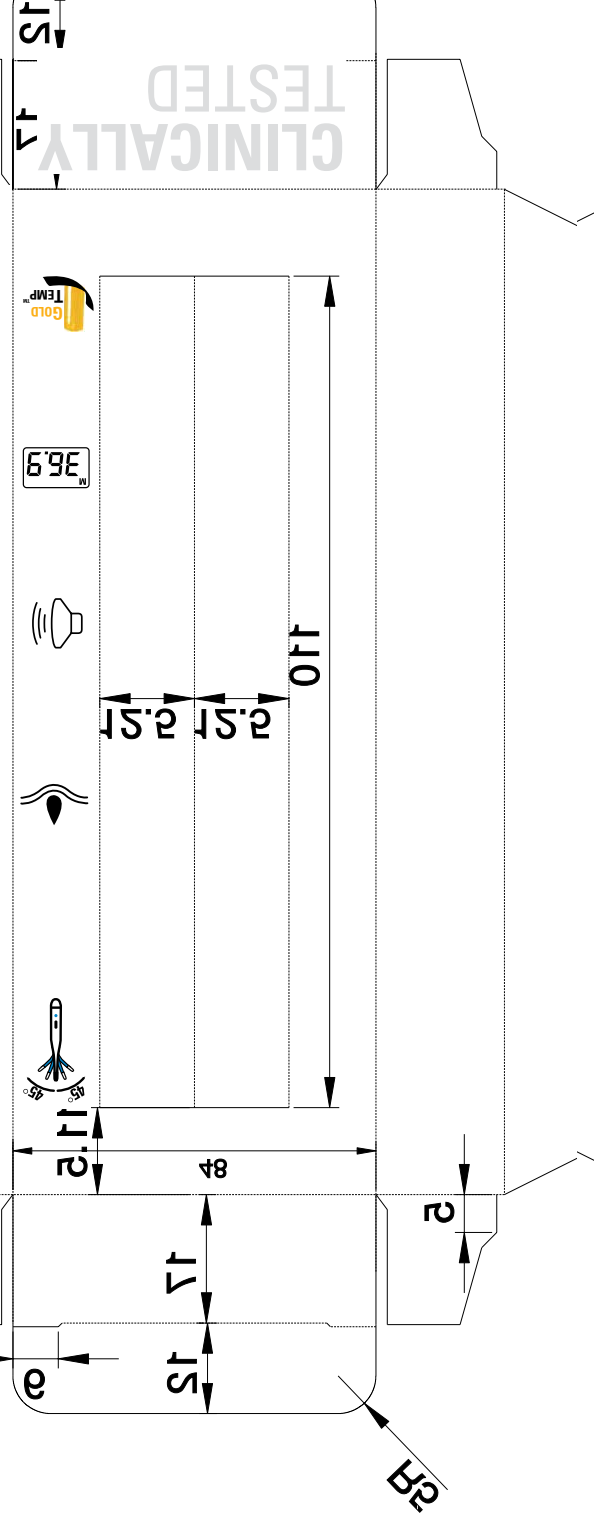


может спасти жизнь Вам и Вашим близким.

- BP A50**
  - Диагностика аритмии пульса
  - Память последнего измерения
  - Удобная и доступная альтернатива механическим тонометрам
- BP A80**
  - Индикация арда (batare)
  - Память последнего измерения
  - Диагностика аритмии пульса
- BP W100**
  - Высокий класс точности A/A
  - Британской Гипертонической Лиги
  - Диагностика аритмии пульса
  - Энергоэкономичная память на 200 измерений с указанием даты и времени
- BP A100**
  - Высокий класс точности A/A
  - Британской Гипертонической Лиги
  - Диагностика аритмии пульса
  - Автоматическое трехкратное измерение давления
  - Интерактивный анализ измерений
  - Энергоэкономичная память на 200 измерений
- BP A100 Plus № 1 в Европе**
  - Высокий класс точности A/A
  - Британской Гипертонической Лиги
  - Диагностика аритмии пульса
  - Точное измерение давления даже при аритмии
  - Автоматическое трехкратное измерение давления
  - Интерактивный анализ измерений
  - Энергоэкономичная память на 200 измерений
  - Сетевой адаптер в комплекте

- FN 200**
  - Ремня для локтя
  - 3 уровня регулировки температуры
  - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине
- FN 422**
  - Электронность
  - 6 уровней регулировки температуры
  - Возможность стирки
  - Высокий уровень безопасности
  - Низкий уровень электромагнитного излучения
- FN 80**
  - Универсальная модель
  - 4 уровня регулировки температуры
  - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине
  - Высокий уровень безопасности

Томометры Микромедиа позволяют контролировать Артериальное Давление просто и комфортно. Артериальная Гипертензия – может привести к инфаркту, инсульту, сердечной, почечной недостаточности. Постоянный контроль Артериального Давления

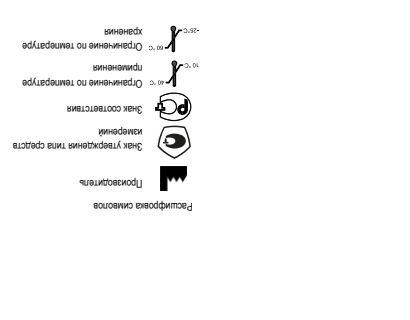

- NEB 50**
  - Универсальный компрессионный кейвэкап
  - Бегающая герман для тнжовных тнжовных
  - Газмер частнй аэрозол: 2-5 мм
- FN 80**
  - Универсальная модель
  - 4 уровня регулировки температуры
  - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине
  - Высокий уровень безопасности
- FN 422**
  - Электронность
  - 6 уровней регулировки температуры
  - Возможность стирки
  - Высокий уровень безопасности
  - Низкий уровень электромагнитного излучения
- FN 200**
  - Ремня для локтя
  - 3 уровня регулировки температуры
  - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине

Может спасти жизнь Вам и Вашим близким. Томометры Микромедиа позволяют контролировать Артериальное Давление просто и комфортно. Артериальная Гипертензия – может привести к инфаркту, инсульту, сердечной, почечной недостаточности. Постоянный контроль Артериального Давления

- NEB 50**
  - Универсальный компрессионный кейвэкап
  - Бегающая герман для тнжовных тнжовных
  - Газмер частнй аэрозол: 2-5 мм
- FN 80**
  - Универсальная модель
  - 4 уровня регулировки температуры
  - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине
  - Высокий уровень безопасности
- FN 422**
  - Электронность
  - 6 уровней регулировки температуры
  - Возможность стирки
  - Высокий уровень безопасности
  - Низкий уровень электромагнитного излучения
- FN 200**
  - Ремня для локтя
  - 3 уровня регулировки температуры
  - Съемный чехол можно стирать в стиральной машине

Может спасти жизнь Вам и Вашим близким. Томометры Микромедиа позволяют контролировать Артериальное Давление просто и комфортно. Артериальная Гипертензия – может привести к инфаркту, инсульту, сердечной, почечной недостаточности. Постоянный контроль Артериального Давления

**Внимание!** Пристраивенное устройство № ФСЗ 2011/0172 от 14.07.2011 г. Сертификат соответствия № 014/177/22.70 от 14.07.2011 г. Счетрасе 139 От 413 Вндрн/Вндрнрн Фнс 41/71 722 30 Е-мэл: адтн@тсфс.с.т. Сайт: www.tcsfcs.com

Технические характеристики	Тип / Тип	Диапазон измерений / Measurement range /	Минимум измерения / Minimum measurement /
Максимум температуры / Maximum temperature	32,0 °C - 43,9 °C	Temp. > 43.9 °C, display «L» for low (low low)	Temp. > 43.9 °C, display «H» for high (too high)
Точность измерения / Measurement accuracy /	± 0,1 °C between 34 °C and 42 °C	± 0,1 °C в диапазоне от 34 °C до 42 °C	
Рабочая температура / Operating temperature /	10 °C to 40 °C, 15-95 % relative humidity	10 °C - 40 °C, влажность относительная влажность 15-95 %	
Self-test / Самопроверка /	Автоматическая проверка при запуске устройства		
Display / Дисплей /	Жидкокристаллический дисплей (LCD) с тремя цифрами, минимальная единица отсчета 0,1 °C		
Signal tone / Звуковой сигнал /	Для сигнализации о готовности прибора к использованию		
Memory / Память /	Для хранения последнего измеренного значения		
Storage temperature / Температурный диапазон /	от -25 °C до +60 °C, 15-95 % относительная влажность		
Battery / Батарея /	1,5 / 1,55 V, LR 41		
Reference to standards / Ссылка на стандарты /	EN 12470-2, медицинское оборудование / EN 11712, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 (EMC)		

Противопоказания: не выявлено. Дата приобретения: [blank].

**STORAGE OF MEASURED VALUES**  
If you hold the button down for more than 3 seconds when turning the thermometer on, the maximum temperature stored automatically at the last measurement will be displayed. At the same time, a small «M» for memory will appear at the right of the display. After 3 more seconds, this value will disappear and the thermometer will switch to the normal measurement mode. Then the stored value is erased.

**TURNING ON THE THERMOMETER**  
To turn on the thermometer, push the button over the display window. A short beep signal «thermometer ON». A display test is performed. All segments should be displayed. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «C» appear at the upper right of the display. The thermometer is now ready for use.



**USING THE THERMOMETER**  
Choose the preferred measuring method. During a measurement, the current temperature is displayed continuously. The «C» symbol flashes during this period of time. If the signaling tone sounds (beep-beep-beep 10 times) and the «C» is no longer flashing, this means that the measured (increase) in temperature is now less than 0.1 °C in 15 seconds and that the thermometer is ready for reading.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**  
The thermometer is suitable exclusively for measurement of the body temperature!  
The minimum measurement time until the signaling tone [beep] must be maintained without exception!  
The thermometer contains small parts (battery, etc.) that can be swallowed by children. Therefore never leave the thermometer unattended to children.  
Protect the thermometer from hitting and striking!  
Avoid bending the tip more than 45°!  
Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the thermometer!  
Use only the commercial disinfectants listed in the section «cleaning and disinfection» to clean the thermometer. The thermometer must be intact when immersed in liquid disinfectant.  
The manufacturer recommends to verify the accuracy by an authorized laboratory every 2 years.Batteries and electronic instruments must be disposed of in accordance with the locally applicable regulations, not with domestic waste.



**Важные инструкции по безопасности**  
Термометр может использоваться исключительно для измерения температуры тела.  
Минимум время измерения важно до появления сигнала «бип» (когда температура тела)  
Термометр содержит мелкие детали (батарея и т.д.), которые ребенок может проглотить.  
Термометр никогда не оставлять без присмотра. Поэтому никогда не оставлять термометр без присмотра.  
Избегать изгиба наконечника более чем на 45°.  
Следует избегать повышения температуры окружающей среды более чем до 60 °C. НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ЗАЩИЩАТЬ ТЕРМОМЕТР ОТ ПОВРЕЖДЕНИЯ И ПОДЪЕМА.Использовать только коммерческие дезинфектанты, перечисленные в разделе «чистка и дезинфекция».  
Для очистки термометра используйте только тех дезинфицирующих средств, которые перечислены в разделе «чистка и дезинфекция».  
Важно поддерживать точность измерения прибора каждые 2 года.  
Батареи и электронные приборы следует утилизировать в соответствии с местными требованиями и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами.  
**Включение термометра**  
Для того чтобы включить термометр, нажмите кнопку «включения» над окошком дисплея короткой языковой кнопкой «М» (языковой кнопкой термометра). Произойдет проверка. Все сегменты дисплея должны быть отображены. Затем при температуре окружающей среды ниже 32 °C в правом верхнем углу дисплея появится символ «L» и мигающий знак «C». Это означает, что термометр готов к работе.  
**Использование термометра**  
Выберите предпочитаемый способ измерения. Во время измерения, текущая температура отображается непрерывно. Символ «С» мигает во время этого периода времени. Если сигнал звучит (бип-бип-бип 10 раз) и символ «С» больше не мигает, это означает, что изменение температуры не превышает 0,1 °C в 15 секунд и что термометр готов к чтению.  
**ХРАНЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ**  
Если при включении термометра более 3 секунд удерживать кнопку «M» в нажатом состоянии, то последнее измеренное значение автоматически сохранится в памяти. В то же время, маленький символ «M» появится справа на дисплее. Через 3 секунды этот символ исчезнет, и термометр переключится на обычный режим измерения. Затем сохраненное значение будет стираться.  
**Технические характеристики**



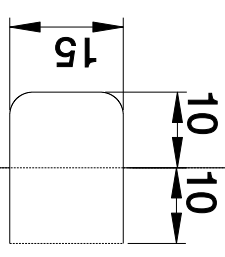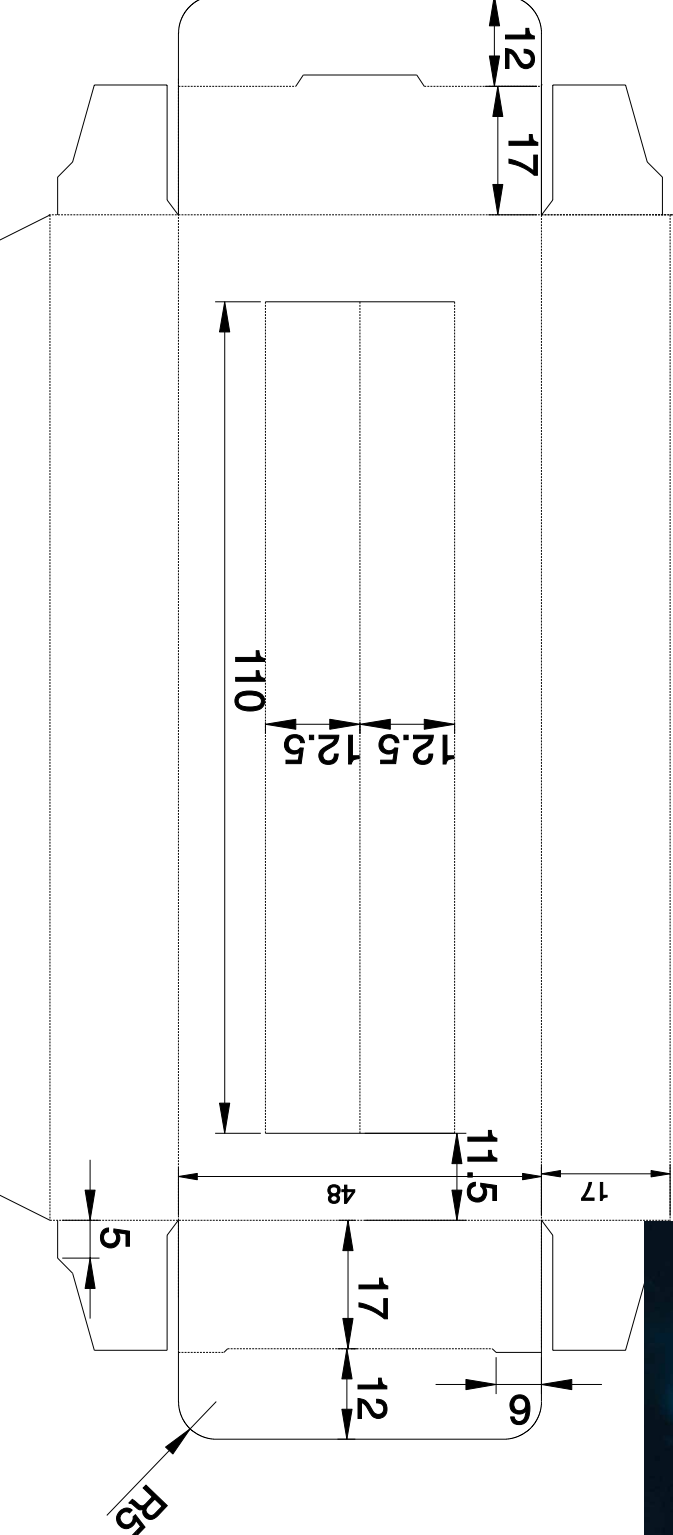

133

microlife®



- Гибкий наконечник
- Антисептический наконечник
- 100% водонепроницаемый

Термометр медицинский электронный MT1931



BB MT 1931 GT EN-RU 4314

### GoldTemp Thermometer MT 1931

#### DESCRIPTION OF THIS PRODUCT / Описание продукта



- Measuring sensor / Gold Tip / Измерительный датчик / наконечник с золотым покрытием
- Display Field / Дисплей
- ON/OFF button / Кнопка Вкл/Выкл
- Battery compartment cover / Крышка отделения для батарей

- Anallergic<sup>1</sup> / Антиаллергенный<sup>1</sup>
- Flexible tip / Гибкий наконечник
- 100% waterproof / 100%-ная водонепроницаемость
- Signal Tone / Звуковой сигнал
- Memory / Память

<sup>1</sup> no nickel in direct contact with the skin / <sup>1</sup> нет прямого контакта никеля с кожей

#### MEASURING METHODS / Способы измерения

Method	Time	Range
Oral / орально	60 seconds / 1 минута	35.7 °C – 37.3 °C
Rectal / ректально	60 seconds / 1 минута	36.2 °C – 37.7 °C
Axillar / аксиллярно	60 seconds* / 1 минута*	35.2 °C – 36.7 °C

\* A minimum measurement time of 3-5 minutes is recommended regardless of the beep sound.  
\* Рекомендуется соблюдать минимальное время измерения 3-5 минут независимо от звукового сигнала.


#### CLEANING AND DISINFECTION / Очистка и дезинфекция

Name / Средства	Immerse / Погружение
Isopropyl alcohol 70%	max. 24 hours
Спирт этиловый для наружного применения	Погружение на 24 часа

#### BATTERY REPLACEMENT / ЗАМЕНА БАТАРЕИ

When the «▼»-symbol appears, battery is exhausted and needs replacing. Please remove the compartment lid of the thermometers and replace the exhausted battery by positioning the + at the top.  
Появление в правом нижнем углу дисплея символа «▼» означает, что батарея исчерпала свой ресурс и нуждается в замене. Замените использованную батарею, установив новую знаком + вверх.

**i** Read the instructions carefully before using this device.  
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство.

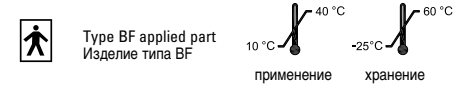

Microlife AG  
Espanstrasse 139  
CH9443 Widnau / Switzerland  
Tel. +41 / 71 727 70 30  
Fax +41 / 71 727 70 39  
Email admin@microlife.ch  
www.microlife.com  
www.microlife.ru

microlife®



CLINICALLY TESTED  
 Термометр медицинский электронный  
 CE0044  
 guarantee (excl. battery)  
 4 71900 3 0600 15