
OMRON

ТЕРМОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ Модель: Flex Temp Smart

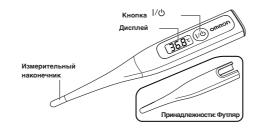

Благодарим Вас за приобретение цифрового термометра OMRON Flex Temp Smart.

Купленный Вами термометр обеспечивает безопасное, точное и быстрое измерение температуры тела. Измерять температуру можно в анальном отверстии (ректальный), во рту (оральный) или подмышкой (аксилярный способ измерения). Используя этот термометр, можно не беспокоиться о том, что стекло разобьется, а также об опасности поражения ртутью. Помните, что курение, прием пищи или жидкости влияют на температуру тела. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы относительно температуры тела, обратитесь к своему врачу.

■Важные замечания по технике безопасности

Чтобы гарантировать правильное использование термометра, необходимо всегда соблюдать основные правила безопасности, включая приве ниже меры предосторожности

- ↑ Предупреждение
 При высокой температуре, а также, если температура не снижается в течение длительного времени, необходимо обратиться за медицинской помощью. Особенно это касается маленьких детей. Обратитесь к своему врачу.
 Внимательно прочтите прилагаемые инструкции и следуйте им, чтобы получать точные показания. Помните, что на показания температуры влияют многие факторы, в том числе физические нагрузки, прием горячих или холодных напитков перед измерением, а также техника измерения. Не двигайтесь во время измерения.
- Самостоятельная постановка диагноза на основании полученных результатов опасна и может привести к ухудшению состояния. Чтобы верно
- Самостоятельная постановка диагноза на основания полученные результать, обратитесь к врачу.
 Данный термометр можно использовать для орального и ректального измерения температуры, а также для измерения в подмышечной впадине. Не пытайтесь измерять температуру в других местах, например, в уже, поскольку полученные показания могут быть неверными, и, кроме того, это
- может привести к травме.

 Храните термометр в местах, недоступных для детей. Не позволяйте детям самостоятельно измерять температуру. Дети могут поранить себя, если будут измерять температуру без контроля со стороны взрослых.

 Не оставляйте батарею, крышку батареи или колпачок датчика в доступных для детей местах. Дети могут проглотить их. Если ребенок проглотил батарею, крышку батареи или колпачок датчика, немедленно обратитесь к врачу.

 Не пытайтесь измерить температуру влажным термометром, поскольку показания могут быть неточными.

- При измерении температуры во рту, не следует сильно сжимать термометр зубами. Это может привести к повреждению термометра и/или травме Термометр предназначен для личного использования
- Не пытайтесь разбирать или ремонтировать термометр. Это может привести к получению неточных показаний
- Не бросайте батарею в огонь. Она может взорваться • Соблюдайте полярность при замене батареи (+ -). Несоблюдение полярности может привести к протеканию батареи, тепловыделению или взрыву и
- Если термометр не будет использоваться в течение 3 месяцев или более, извлеките батарею. Несоблюдение полярности может привести к
- Если термометр не оудет использоваться в течение з месяцев или оолее, извлеките оатарею. Несоолюдение полярности может привести к
 протеканию батарем, телловыделению или взрыву и повреждению прибора.
 Не используйте термометр в местах, где образуется сильное статическое электричество или электромагнитные поля. Это может привести к
 получению неточных показаний и повреждению прибора.
 Не используйте ректальный способ измерения температуры при ректальных расстройствах. Это может привести к ухудшению состояния.
 Не наступайте на прибор или жесткий футляр.
 Не откорибую измериции бером или иместкий бутляр.

- Не отклоняйте наконечник более чем на 45 градусов.


ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Используйте термометр только для измерения температуры тела человека
 Не бросайте термометр и футляр и не подвергайте их ударам или вибрации


■ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ШКАЛАМИ ЦЕЛЬСИЯ/ФАРЕНГЕЙТА

Удерживайте нажатой кнопку // В течение 7 секунд, пока

. Во время звукового сигнала система измерения на дисплее

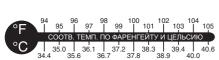



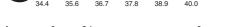

Аксилярный способ (измерение в подмышечной впадине) Следующие факторы могут привести к получению неверных показаний при измерении температуры в подмы

Сильное потоотделение подмышкой Для устранения вышеназванного фактора: перед измерением температуры насухо вытрите подмышечную впадину

ение температуры после того, как пациент долго находился под одеялом

Поместите измерительный наконечник в центр подмышечной впадины.

• Прижимая наконечник термометра плечом, зафиксируйте его в







■Замена батареи

Батарея: щелочно-марганцевая батарея таблеточного типа LR41 (доступна в продаже

Символ замены батареи (💢)


Замените батарею, если после включения терм

1. Для снятия крышки используйте монету.





2. Извлеките батарек

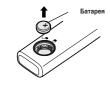

3. Вставьте новую батарею полюсом «+ вверх, как показано на рисунке





- Термометр поставляется с батареей для проверки его работоспособности. Срок службы этой батареи, возможно, будет еньше, чем у новой батареи.
- Не потеряйте уплотивтельное кольцо, которое находится поверх резьбы. В противном случае возможно попадание влаги внутрь корпуса, что может привести к неправильным измерениям и

■ОТОБРАЖАЕМЫЕ ИНДИКАТОРЫ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Символ | Причина | Способ решения | |
|--|---|--|--|
| (низкая) | Отображается, если температура чувствительного элемента ниже 32 °C (89,6 °F). | Это не ошибка, температуру можно измерять. | |
| Н (высокая) | Отображается, если температура чувствительного элемента выше 42 °C (107,6 °F). | Охладите чувствительный элемент термометра и измеряйте температуру. | |
| Отображается температура воздуха | Отображается, если температура окружающего воздуха выше 32 °C (89,6 °F). | | |
| [37,0 °C (98,6 °F)] не отображается во время подготовки к измерению как дисплей тестирования. После последнего измерения отображается его результат. | Несколько раз включите и выключите термометр. Если вместо обозначающих самотестирование значений в диапазоне от [36,9 °C (98,4 °F)] до [37,1 °C (98,8 °F)], обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру OMRON. | | |

■Чистка и дезинфекция

Компания OMRON рекомендует протирать термометр влажной тканью. Для дезинфекции можно использовать 70% этанол или изопропилов Запрещается дезинфицировать чувствительный элемент термометра погружением его в спирт или горячую воду (температура которой выше 50 °C). Не погружайте термометр на глубину более 15 см и на время более 30 минут.

■и3мерение температуры

1. Нажмите кнопку I/O

ПРИМЕЧАНИЕ.

результат предыдущего измерения. Затем отобразится значение 37,0 °C (98,6 °F), отражая внутреннюю функцию самотестиро

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если отобразится значение, отличное от 37,0 °C (98,6 °F), обратитесь к разделу «Отображаемые индикаторы и устранение неисправностей», чтобы устранить неисправность.

2. Приступите к измерению температуры одним из способов,

Если индикатор «L» не отображается (отображается только температура), это не является ошибкой. Можно

3. Подача четырехкратного звукового сигнала [бип-бип-бип-

достать термометр и посмотреть результат.

бип] три раза свидетельствует о том, что обязательное


ьное время измерения завершено. Вы можете

ных в данной инструкции





Дисплей тестирования 37,0 °C

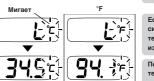

Если на дисплее мигает символ [°C (°F)], это означает, термометр готов к

температуры символ [°С (°F)] олжит мигать.

После получения результата измерения символ [°С (°F)]

ИНТЕРВАЛ ПОЛАЧИ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Оральное измерение: прибл. 20

Ректальное измерение: прибл. 10 секунд

25 секунд*

* 25 секунд – это минимальное время измерения в подмышечной впадине, позволяющее оценить общее состояние организма. Для получения окончательного результата рекомендуется проводить измерение в течение 2-5 минут (в зависимости от условий окружающей среды и

ПРИМЕЧАНИЯ.

- ПРИМЕЧАНИН.
 Чамерение продолжается даже после подачи звукового сигнала.
 Значения интервала подачи звукового сигнала были получены при температуре окружающего воздуха 23 градуса.
 Поскольку оральный и аксилярный способы измерения дают менее точные результаты, для получения наиболее точного результата рекомендуется ректальный способ.
 При измерении температуры в подмышечной впадине неплотный тепловой контакт наконечника термометра с кожей, а также индивидуальные
- физиологические особенности организма могут привести к преждевременному срабатыванию звукового сигнала и заниженному результату измерения. Если продолжить измерение, не выключая термометр, и обеспечить более плотное прилегание измерительного наконечника, то показания термометра будут увеличиваться до достижения температуры, соответствующей температуре тел эт очке соприкосновения наконечника термометра. Выключите термометр. Прежде чем уложить термометр обратно в защитный футляр, протрите и продезинфицируйте его.

 Измеренное значение будет автоматически сохранено в памяти.
 Не забывайте вручную выключать термометр, это продлит срок службы батареи. Термометр автоматически выключится через 30 минут после использования или через 3 минуты после включения, если он не использовался. ■Отображение последнего полученного значения

Нажмите кнопку I/Φ , чтобы отобразить значение температуры, полученное при последнем измерении. Для получения дополнительной информации см. раздел «ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ».

■Способы измерения температуры тела

Только правильный метод измерения температуры обеспечивает его точность.

Следующие факторы могут привести к получению неверных показаний.

• Измерение температуры сразу после выполнения физических упражнений, приема ванны, приема пищи или жидкости приведет к неверным пока Для получения верных показаний: подождите не меньше 30 минут перед измерением температуры.

Измерение температуры после выполнения активных действий.
 Для получения правильных показаний: измеряйте температуру сразу же после пробуждения или подождите не меньше 30 минут после выполнения

 * Совершение активных действий после пробуждения приводит к увеличению температуры тела. Дисплей должен быть

ОРАЛЬНЫЙ СПОСОБ (ОТ 4 ЛЕТ И СТАРШЕ)

Поместите термометр в рот, под язык, так, чтобы он касался основания языка слева или справа Чтобы удержать термометр на месте, прижмите его языком. • Придерживайте термометр так, чтобы он не смещался во рту.

РЕКТАЛЬНЫЙ СПОСОБ:

Используется, как правило, у маленьких детей, когда трудно измерить температуру подмышкой или

во рту.
Смажьте наконечник термометра детским кремом или другим не раздражающим кожу гелем.
Осторожно вставьте измерительный наконечник в анальное отверстие не глубже чем на 1,3 см. При возникновении сопротивления не прилагайте усилий для ввода наконечника в анальное отверстие. • Продезинфицируйте термометр после использования.

1,5 В пост. тока, 1 щелочно-марганцевый элемент

питания типа LR41

■Хранение

Храните термометр в футляре.

в местах с высокой влажностью и температурой, а также не зац ных от прямых солнечных лучей; вблизи нагревательных устройств, в среде с повышенной запыленностью или с высокой концентрацией соли в воздухе;

в местах, где термометр будет подвергаться тряске, вибрации или ударам; в местах хранения лекарственных препаратов или с наличием агрессивных газов

■ГАРАНТИЯ

Компания ОМЯОN дает на это изделие 3 года гарантии с момента покупки. Гарантия не распространяется на повреждения в результате неправильного

обращения или использования. Парантия также не распространяется на батарею и упаковку. Иски о возмещении других убытков не принимаются. К гарантийной рекламации должен быть приложен чек на покупку. ■Характеристики

| Потребляемая мощность: | 0,1 мВт | Срок службы элемента питания: | Прибл. 2 года или более (при измерении 3 раза в день) | |
|--|--|-------------------------------|---|--|
| Тип датчика: | Терморезистор | Метод измерения: | Фактическое измерение (не прогнозирование) | |
| Индикатор температуры: | 3-разрядный (°C) или 4-разрядный (°F), отображение | | | |
| | температуры с дискретностью 0,1 градуса | | | |
| Пределы допускаемой | ± 0,1 °C (32,0-42,0 °C) | | • | |
| абсолютной погрешности | ± 0,2 °F (от 89,6-107,6 °F) | Рабочая часть аппарата: | =Тип В | |
| измерений температуры: | (измерение при стандартной комнатной температуре | гаоочая частв аппарата. | T = INIT B | |
| | 23 °C [73,4 °F] в тестовой камере, где | | / \ | |
| | поддерживается постоянная температура) | | | |
| Диагвзон измерений температуры: от 32,0 до 42,0 °C (от 89,6 до 107,6 °F) | | | | |
| Условия эксплуатации: | | | | |
| температура окружающего воздуха | ∎ от +10 до +40 °C | | | |
| относительная влажность | от 30% до 85% | | | |
| Условия хранения: | | | | |
| температура окружающего воздух | ∎ от –20 до +60°C | | | |
| относительная влажность | от 10% до 95% | | | |

- Характеристики могут быть изм
- Прибор водонепроницаемого типа.
- Наконечник термометра содержит никель • Этот термометр не солержит каких-либо комп
- етра раз в два года в представительстве OMRON. ное изделие OMRON произведено с примене

Этот прибор удовлетворяет положениям директивы EC 93/42/EEC (директива в отношении медицинского оборудования) и европейскому стандарту EN12470:2000, Мелицинские термометры — Часть 3: Функционирован ние компактных электротермометров (не прогнозирующих и прогнозирующих) по максимальной схеме

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)
Поскольку количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные
(сотовые) телефоны, увеличивается, используемые медицинские приборы
могут быть чувствительными к электромагнитным помехам, создаваемым
другими устройствами. Электромагнитные помехи могут нарушать работу
медицинского прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию.
Медицинские приборы также не должны мешать функционированию других
устройств. устройств.

Ітобы регла тировать требования по ЭМС (электромагнитной мости) с целью предотвращения воз ых с использованием продукции, был введен в действие тандарт EN60601-1-2:2007. Этот стандарт определяет уровни устойчивости н злучения применительно к мелицинскому оборулова

Данный медицинский прибор, произведенный компанией ОМRON Healthcare, удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2007 относительно устой-извости к помехам и испускаемого излучения. Тем не менее следует соблюдать специальные меры предосторожности: • Вблизи данного медицинского прибора не следует использовать мобильные (сотовые) телефоны и прочие устройства, которые генерируют сильные электрические или электромагнитные поля. Это может нарушать работу прибора и создвать потенциально небезопасную ситуацию. Рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 7 м. Удостоверьтесь в правильности работь прибора, если дистанция меньше.

Остальная документация о соответствии EN60601-1-2:2007 находится в офисе компании OMRON Healthcare Europe по адресу, указанному в этом руководстве. С этой документацией также можно ознакомиться на сайте www.omron-healthcare.com.

Надлежащая утилизация продукта ое электрическое и электронное

о (др. х. то, о (др. нт питания, футляр для хранения прибора, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, информационный лист.

ов, подлежащих техническому обслуживанию. Компания OMRON рекомендует проверять точность измере

Этот символ на продукте или описании к нему указывает, что ии отхолами по окончании срока службы. Для предотвращения возможного ущерба для окружаюц . ей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отхолов, пожалуйста, отлелите этот пролукт от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рац о использования материальных ресурсов

Домашним потребителям следует связаться с розничным торговым представителем, у которого продукт был приобретен, или местным органо власти, для получения подробной информации о том, куда и как доставить данный прибор для экологически безопасной переработки.

сроки и условия контракта на закупку. Данный продукт не следует утилизировать совместно с другими коммерческими отходами.

Данный продукт не содержит никаких вредных веществ. Утилизация отработанных батареек должна производиться в соответствии с установленными правилами утилизации аккумуляторных батарей.



